

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?
<p>Hände/Haut Desinfektion</p>	Hygienische Händedesinfektion WiBUplus Händedesinfektion konz. 30 Sek. – satte Benetzung WiBUplus Händedesinfektionsgel konz. 30 Sek. – satte Benetzung WiBUplus Händedesinfektion sensitiv konz. 30 Sek. – satte Benetzung	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Vor Dienstbeginn/nach Dienstende. Vor und nach Patientenkontakt. Vor dem Anziehen und nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Nach Toilettenbenutzung. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material und Gegenständen. Bei Bedarf.	
<p>Hände/Haut Pflege</p>	Händewaschung WiBUplus milde Waschlotion WiBUplus Waschlotion sensitiv WiBUplus Cremeseife mild WiBUplus Schaumseife sensitiv	Waschlotion/Seife in die Hände geben und gut mechanisch reinigen. Gründlich abspülen und anschließend mit Einmal-Handtüchern sorgfältig trocknen.	Bei Arbeitsbeginn. Bei sichtbarer Verschmutzung. Nach der Arbeit.	
	Hautschutz WiBUplus Handschutzcreme WiBUplus Handschutzcreme sensitiv	Creme auf saubere, trockene Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Bei Arbeitsbeginn. Vor längerem Tragen von Handschuhen. Nach dem Händewaschen.	
	Hautpflege WiBUplus Handpflegecreme WiBUplus Handpflegecreme sensitiv	Hautpflegeprodukt auftragen und gründlich in die saubere, trockene Haut einmassieren.	Nach Pausen. Nach Arbeitsende.	
<p>Instrumente</p>	Instrumente WiBUplus Instrumentendesinfektion 1,0 % – 60 Min. 2,0 % – 30 Min.	Instrumente in eine Instrumentenwanne (mit Siebeinsatz und Deckel) mit Desinfektionsmittellösung legen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen. Ggf. der Sterilisation zuführen.	Nach Benutzung.	
	Abformungen und zahntechnische Werkstücke Safeline® Prent Des konz. – 5 Min.	Werkstücke aus Alginaten und Hydrokolloiden kurz eintauchen und anschließend 5 Min. abtrocknen lassen. Andere Materialien 5 Min. in die Lösung einlegen, anschließend mit Wasser abspülen.	Nach jeder Behandlung.	
	Zahnmedizinische Abformlöffel Safeline® Tray Clean 5,0 % – 10,0%	Abdrucklöffel grob vorreinigen. In die Anwendungslösung einlegen. Abspülen, trocknen.	Nach jeder Behandlung.	
	Rotierende Instrumente Safeline® Instru Des Direkt konz. – 15 Min.	Ultraschallbad oder Bad-Verfahren im Fräsator. Nicht abspülen, trocknen.	Sofort nach Benutzung.	
	Hand- und Winkelstücke	Entsprechend der Herstellerangaben.	Nach jeder Behandlung.	
<p>Fläche/ Inventar</p>	Absauganlagen Desinfektion Safeline® Suction Des 2,0 % – 15 Min.	Konzentrat in heißem Wasser lösen und direkt absaugen. Desinfektionsmittel nicht über Nacht in der Anlage stehen lassen.	Mind. 1 x täglich. Bei Bedarf öfter.	
	Absauganlagen Reinigung Safeline® Suction Clean Konzentrat zur Spezialreinigung 5,0 % – 10,0 %, 1,5–2 Stunden	Gebrauchsfertige Lösung durch Saugschläuche saugen (2/3) und ins Mundspülbecken kippen (1/3). Mit klarem Wasser nachspülen. Lösung nicht über Nacht in der Anlage stehen lassen.	1–2 x wöchentlich.	
	Mundspülbecken WiBUplus Schnelldesinfektion Pur gebrauchsfertig – 2 Min. WiBUplus Desinfektionstücher Pur gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach jeder Behandlung.	
	Waschbecken Toiletten WiBUplus Flächendesinfektion 2,0 % – 30 Min. WiBUplus Schnelldesinfektion Pur gebrauchsfertig – 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach Kontamination.	
	Flächendesinfektion Behandlungsbereich Fußboden, Inventar, sonstige Ober- und Kontaktflächen WiBUplus Flächendesinfektion 2,0 % – 30 Min. WiBUplus Schnelldesinfektion Pur gebrauchsfertig – 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Bedarf.	
	Fußboden und große Flächen WiBUplus Flächendesinfektion 2,0 % – 30 Min. WiBUplus Schnelldesinfektion Pur gebrauchsfertig – 2 Min. WiBUplus Schnelldesinfektion Lemon gebrauchsfertig – 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Bedarf.	
	Medikamentenschrank Materialschrank WiBUplus Schnelldesinfektion Pur gebrauchsfertig – 2 Min. WiBUplus Desinfektionstücher Pur gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	In regelmäßigen Abständen, d. h.: 1 x monatlich. Bei Bedarf.	
	Abfalleimer WiBUplus Schnelldesinfektion Pur gebrauchsfertig – 2 Min. WiBUplus Desinfektionstücher Pur gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Bedarf.	
<p>Schutzkleidung/ Utensilien</p>	Praxiswäsche z. B. textile Praxis- kleidung, textile Teile der Schutzausrüstung Desinfizierendes Waschverfahren: WiBUplus Desinfektionswaschmittel	Thermische oder desinfizierende Aufbereitung.	Praxiskleidung mind. 2 x wöchentlich. Schutzausrüstung nach Gebrauch.	



Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?	
<p>Hände/Haut Desinfektion</p>	Hygienische Händedesinfektion	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Vor Dienstbeginn/nach Dienstende. Vor und nach Patientenkontakt. Vor dem Anziehen und nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Nach Toilettenbenutzung. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material und Gegenständen. Bei Bedarf.		
<p>Hände/Haut Pflege</p>	Händewaschung	Waschlotion/Seife in die Hände geben und gut mechanisch reinigen. Gründlich abspülen und anschließend mit Einmal-Handtüchern sorgfältig trocknen.	Bei Arbeitsbeginn. Bei sichtbarer Verschmutzung. Nach der Arbeit.		
	Hautschutz	Creme auf saubere, trockene Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Bei Arbeitsbeginn. Vor längerem Tragen von Handschuhen. Nach dem Händewaschen.		
	Hautpflege	Hautpflegeprodukt auftragen und gründlich in die saubere, trockene Haut einmassieren.	Nach Pausen. Nach Arbeitsende.		
<p>Instrumente</p>	Instrumente	Instrumente in eine Instrumentenwanne (mit Siebeinsatz und Deckel) mit Desinfektionsmittellösung legen und vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und trocknen. Ggf. der Sterilisation zuführen.	Nach Benutzung.		
	Abformungen und zahntechnische Werkstücke	Werkstücke aus Alginaten und Hydrokolloiden kurz eintauchen und anschließend 5 Min. abtrocknen lassen. Andere Materialien 5 Min. in die Lösung einlegen, anschließend mit Wasser abspülen.	Nach jeder Behandlung.		
	Zahnmedizinische Abformlöffel	Abdrucklöffel grob vorreinigen. In die Anwendungslösung einlegen. Abspülen, trocknen.	Nach jeder Behandlung.		
	Rotierende Instrumente	Ultraschallbad oder Bad-Verfahren im Fräsator. Nicht abspülen, trocknen.	Sofort nach Benutzung.		
	Hand- und Winkelstücke	Entsprechend der Herstellerangaben.	Nach jeder Behandlung.		
<p>Fläche/ Inventar</p>	Absauganlagen Desinfektion	Konzentrat in heißem Wasser lösen und direkt absaugen. Desinfektionsmittel nicht über Nacht in der Anlage stehen lassen.	Mind. 1 x täglich. Bei Bedarf öfter.		
	Absauganlagen Reinigung	Gebrauchsfertige Lösung durch Saugschläuche saugen (2/3) und ins Mundspülbecken kippen (1/3). Mit klarem Wasser nachspülen. Lösung nicht über Nacht in der Anlage stehen lassen.	1 – 2 x wöchentlich.		
	Mundspülbecken	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach jeder Behandlung.		
	Waschbecken Toiletten	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach Kontamination.		
	Flächendesinfektion Behandlungsbereich	Fußboden, Inventar, sonstige Ober- und Kontaktflächen	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Bedarf.	
	Fußboden und große Flächen	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Bedarf.		
	Medikamentenschrank Materialschrank	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	In regelmäßigen Abständen, d. h.: 1 x monatlich. Bei Bedarf.		
	Abfalleimer	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Bei Bedarf.		
<p>Schutzkleidung/ Utensilien</p>	Praxiswäsche z. B. textile Praxis- kleidung, textile Teile der Schutzausrüstung	Thermische oder desinfizierende Aufbereitung.	Praxiskleidung mind. 2 x wöchentlich. Schutzausrüstung nach Gebrauch.		

