

# DOSIERTABELLE



WiBUplus Instrumentendesinfektion

Fertige Gebrauchslösung	0,25 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %	3,0 %	4,0 %	5,0 %
<b>1 Liter</b>	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
<b>2 Liter</b>	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml
<b>3 Liter</b>	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml
<b>4 Liter</b>	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml
<b>5 Liter</b>	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml
<b>8 Liter</b>	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml
<b>10 Liter</b>	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml
<b>16 Liter</b>	40 ml	80 ml	160 ml	240 ml	320 ml	480 ml	640 ml	800 ml
<b>20 Liter</b>	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1000 ml
<b>30 Liter</b>	75 ml	150 ml	300 ml	450 ml	600 ml	900 ml	1200 ml	1500 ml
<b>Einwirkzeit</b>	<b>60 Min.</b>			<b>30 Min.</b>		<b>15 Min.</b>		

**Anwendung:** 10 Liter (1%ige Lösung) = 100 ml Desinfektionsmittel + 9,9 Liter Wasser

Wasser vorlegen, Desinfektionsmittelkonzentrat hinzufügen und umrühren. Ansatzetikett (804859) ausfüllen und Behältnis damit kennzeichnen.

Den Ansatz in einem sauberen, abgedeckten Gefäß lagern und arbeitstäglich erneuern.

Stand: 08/2018