



So legen Sie Schutzmasken korrekt an


Hinweis: Vor dem Anlegen der Maske und vor jeglicher Manipulation während des Tragens ist zwingend eine Händedesinfektion durchzuführen. Wählen Sie die passende Schutzklasse aus, überprüfen die Haltbarkeit und kontrollieren die Schutzmaske auf Beschädigungen.

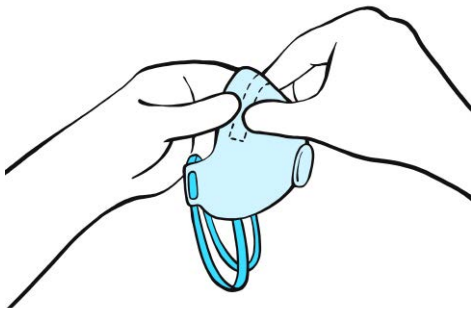


- 1.** Falten Sie die Maske gegebenenfalls auseinander und formen Sie mit einem Finger den Nasenclip vor

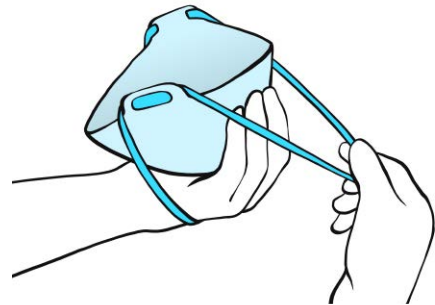


- 2.** Legen Sie die Maske mit den Kopfbändern nach unten in die Hände

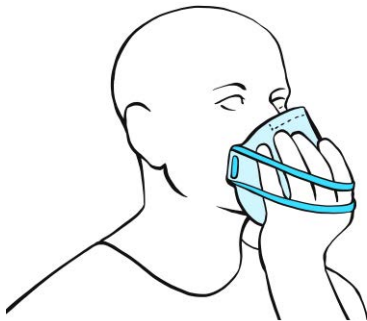

- 3.** Steigen Sie zuerst mit dem Kinn in die Maske und ziehen Sie diese dann über die Nase

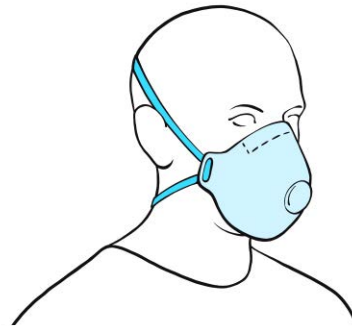

- 4.** Platzieren Sie das untere Kopfband im Nacken und das obere Kopfband oberhalb der Ohren

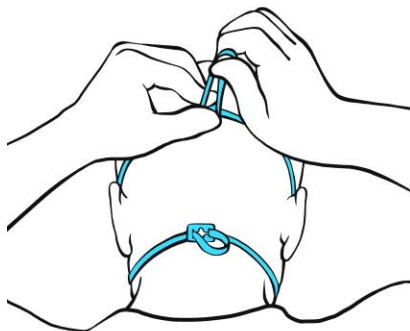

- 5.** Passen Sie die Kopfbänder individuell an



- 6.** Mit beiden Zeigefingern passen Sie nun den Nasenclip an