

DOSIERTABELLE



WiBUplus Instrumentendesinfektion

Fertige Gebrauchslösung	0,25 %	0,5 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %	3,0 %	4,0 %	5,0 %
1 Liter	2,5 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
2 Liter	5 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml
3 Liter	7,5 ml	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	90 ml	120 ml	150 ml
4 Liter	10 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml
5 Liter	12,5 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml
8 Liter	20 ml	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml
10 Liter	25 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml
16 Liter	40 ml	80 ml	160 ml	240 ml	320 ml	480 ml	640 ml	800 ml
20 Liter	50 ml	100 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1000 ml
30 Liter	75 ml	150 ml	300 ml	450 ml	600 ml	900 ml	1200 ml	1500 ml

Anwendung: 10 Liter (1%ige Lösung) = 100 ml Desinfektionsmittel + 9,9 Liter Wasser

Wasser vorlegen, Desinfektionsmittelkonzentrat hinzufügen und umrühren. Ansatzetikett (804859) ausfüllen und Behältnis damit kennzeichnen.

Den Ansatz in einem sauberen, abgedeckten Gefäß lagern und arbeitstäglich erneuern.

Stand: 10/2020